

Be aldehydų



Mikrozid[®] AF Liquid

Aerozolinis paviršių dezinfektantas

Dėmesio!

Ši naudojimo instrukcija skirta profesionaliems naudotojams
Profesionalūs naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Paskirtis

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įrenginių, baldų, inventoriaus, nedidelių paviršių, pacientų apžiūros įrangos, prietaisų, operacinių stalų ir įrengimų, stomatologinių kėdžių antgalių, paciento kėdžių, spjaudyklių, turbinų ir kito stomatologinio inventoriaus dezinfekcijai. Šia priemone galima dezinfekuoti grožio salonų inventorių ir nedidelius paviršius.

Tinka paviršiams iš vario, žalvario, plastiko, polietileno, stiklo, gumos.

Sudėtis

100g sudėtis: 25,0 g etanolio ir 35,0 g 1-propanolio.

Kitos udedamosios dalys: paviršiaus aktyviosios bei aromatinės medžiagos.

Savybės

Skaidrus, bespalvis skystis. Paruoštas naudojimui. Jo sudėtyje nėra aldehydų, todėl nedirgina kvėpavimo takų, nesukelia kosulio ir odos alergijos. Gerai drėkina paviršių, greitai veikia ir išdžiūsta nepalikdamas apnašų. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio, Rota, Papova), grybelius, MRSA

Naudojimas

Preparatas paruoštas naudojimui. Dezinfekuojami paviršiai apipurškiami iš 30 cm atstumo. išpurškama apie 40 -- 50 ml/m²). Po 2 min. Paviršius visiškai išdžius. Preparato perteklių nuvalyti sausu vienkartinio skudurėliu. Preparatui purkšti naudojami specialūs užsukami purkštuvai (1l buteliams). Ekspozicija – 2 min.

Darbų saugos nurodymai

Pateikiami saugos duomenų lape, kuris pridedamas įsigyjant preparatą.

Pakuotės

250 ml buteliukas su purkštuvu

1 litro polietileno butelis

10 litrų polietileno kanistras