

Be aldehydų, be alkoholių



Mikrozid<sup>®</sup> Sensitive Liquid

## Aerozolinis paviršių dezinfektantas

### **Dėmesio!**

Ši naudojimo instrukcija skirta profesionaliems naudotojams  
Profesionalūs naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

### **Paskirtis**

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įrenginių, baldų, inventoriaus, nedidelių paviršių, pacientų apžiūros įrangos, prietaisų, ultragarso daviklių, operacinių stalų ir įrengimų, stomatologinių kėdžių antgalių, paciento kėdžių, spjaudyklių, turbinų ir kito stomatologinio inventoriaus dezinfekcijai.

Tinka paviršiams iš vario, žalvario, plastiko, polietileno, stiklo, gumos, organinio stiklo, grožio salonų instrumentų ir paviršių dezinfekcijai (tinka jautrių alkoholiui paviršių ir instrumentų dezinfekcijai).

### **Sudėtis**

100g sudėtis: 0,26g ketvirtinių amonio junginių, benzyl-c12-c18-alkyldimetyl chloridų, 0,26g didecyldimethylamonio chlorido, 0,26g ketvirtinių amonio junginių, c12-c14-alkyl ([etylfenyl] metyl] dimetylamonio chloridų.

### **Savybės**

Skaidrus, bespalvis skystis. Paruoštas naudojimui. Jo sudėtyje nėra alkoholių, todėl jis puikiai tinka alkoholiams jautrių paviršių dezinfekcijai. Gerai drėkina paviršių, greitai veikia ir išdžiūsta nepalikdamas apnašų. Veikia bakterijas, virusus (HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia, Rota), MRSA.

### **Naudojimas**

Aerozolinis įvairiems paviršiams, instrumentams (įsk. jautriems) skirtas dezinfektantas.

Preparatas paruoštas naudojimui. Dezinfekuojami paviršiai apipurškiami iš 30 cm atstumo. išpurškama apie 40 -- 50 ml/m<sup>2</sup>) Ekspozicijos laikas – 1 min. Po 1 min. preparato perteklių nuvalyti sausu vienkartinio skudurėliu. Naudoti tik patalpoje su ištraukiamąja ventiliacija. Preparatui purkšti naudojami specialūs užsukami purkštuvai (1l buteliams).

### **Darbų saugos nurodymai**

Pateikiami saugos duomenų lape, kuris pridedamas įsigyjant preparatą.

### **Pakuotės**

- 1 litro polietileno butelis
- 5 litrų polietileno kanistras